



**myglucohealth<sup>®</sup>**  
ONLINE DIABETES MANAGEMENT SYSTEM

Utilizing Meter Models: MGH-BT1 (42 6017 197 011 3)  
& MGH-1 (42 6017 197 010 6)

42 6017 197 001 4 (MGH-BT1, meter)

42 6017 197 002 1 (MGH-1, meter)

*"The New Way to Manage Your Diabetes"*



**CE** 0459

**Bruger vejledning model**

**MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1**

Forhandles i Skandinavien af

**CuraTec Aps  
Scandinavian Trade Building  
Gydevang 39 – 41  
DK -3450 Allerød**

**curatec@mail.dk  
[www.curatec.dk](http://www.curatec.dk)**



## Hurtigt overblik.

### Trin 1.

Isæt myglucohealth strip.  
Kode nummer vises automatisk.



### Trin 2

Vælg aktuel aktivitet ved at trykke  
Når aktivitet er valgt tryk på tænd knap.



### Trin 3

Tilfør blod prøve indtil vindue på strip  
er fyldt. MGH måler begynder  
nedtælling.

### Trin 4

Test resultat vises indenfor 3 sekunder.

## Vigtig information.

MyGlucoHealth system er udviklet til en hurtig og nem måde for diabetes patienter at måle og selv-monitorere blod glucose niveau.

Apparatet må kun anvendes for test af blod glucose ( blodsukker ) og kun med ny strip. Det må ikke anvendes til diagnose for diabetes eller til test på nyfødte.

Anvend ikke myglucohealth system til andre formål end glucose tests. Myglucohealth system er beregnet til udvendig brug til selvtest ” in vitro diagnostisk brug.”

## Advarsel:

Inden brugen af myglucohealth meter læs alle instruktioner i manualen og informationer om brugen af test strips.

Alle ændringer af din terapi skal ske i samråd med din læge.

## Afsnit indhold:

## LÆR SYSTEMET AT KENDE

Monitorerings system sæt indeholder  
Myclucohealth Blod Glucose måler  
Myclucohealth Blod Glucose test strip  
Afprøv system med myglucohealth væske

## FØR TEST:

Indstil Myclucohealth måler

## TEST DIT BLOD CLUCOSE:

Automatisk kode gengivelse  
Udvalg af blod dråber  
Test dit blod  
Test strip injektor funktion  
Gense dine resultater  
Slet test resultater  
Myglucohealth Bluetooth funktion  
(kun for Model MGH-BT1)  
Registrering

## VEDLIGEHOEDELESE AF MYGLUCOHEALTH METER:

Pleje af din måler  
Batteri installation  
Problem løsning  
Specifikationer  
Symbol kort  
Principper i tests  
Blod glucose konverterings tabel  
mmol/L til mg/dL

## Sæt indhold:




- 1 Myglucohealth måler
- 2 Myglucohealth test strips
- 3 Lancet udstyr
- 4 Lancetter
- 5 Bruger manual
- 6 Garanti registrerings kort
- 7 2 stk. 1,5 V Alkaline batterier AAA
- 8 Bære taske


Efterse dit Myglucose system for at sikre det ikke har været åbnet og indeholder alle komplette dele som beskrevet ovenstående.

Såfremt dette ikke er tilfældet anvend ikke apparatet - men kontakt din leverandør.

## Myglucohealth måler

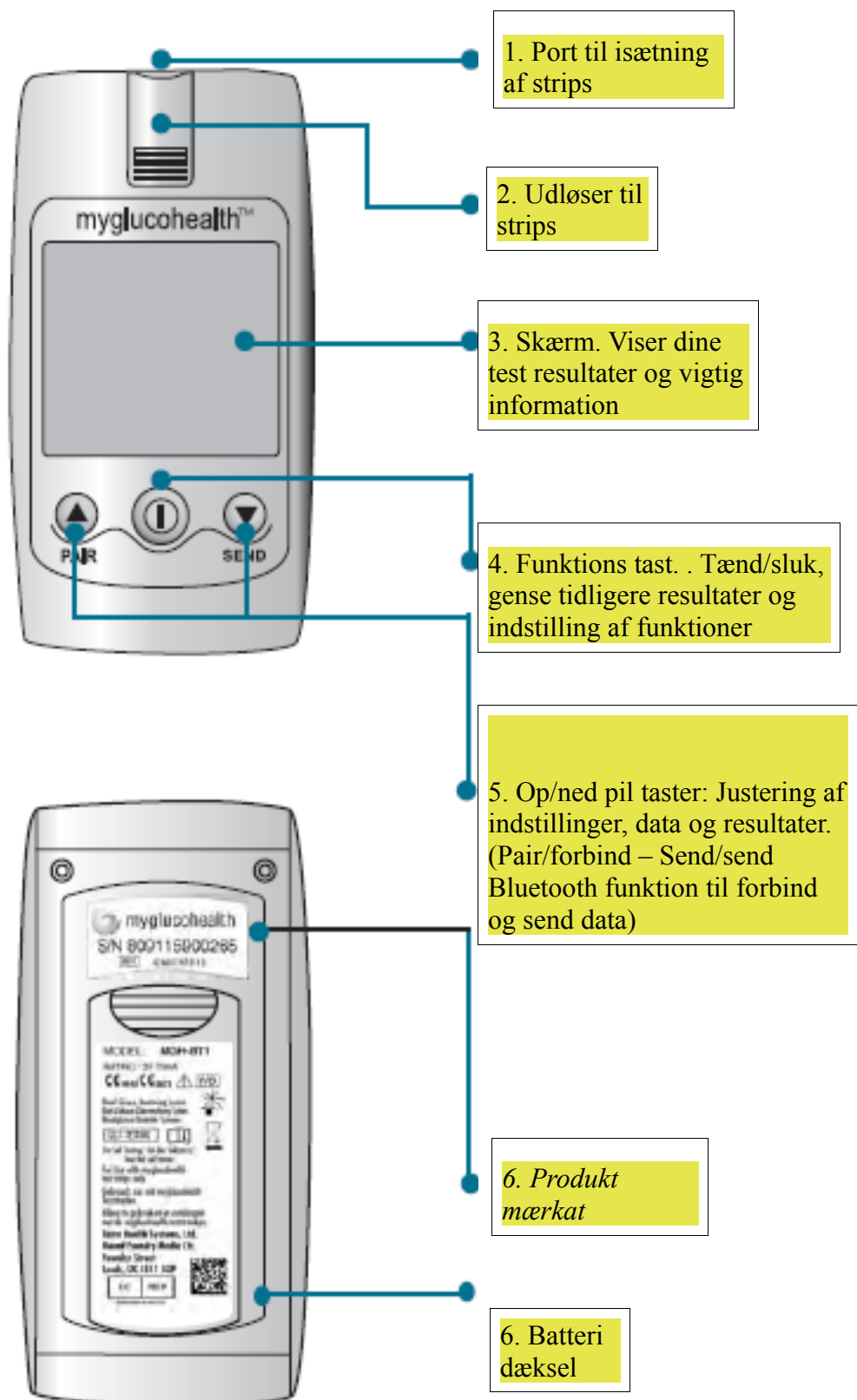

## LCD skærm

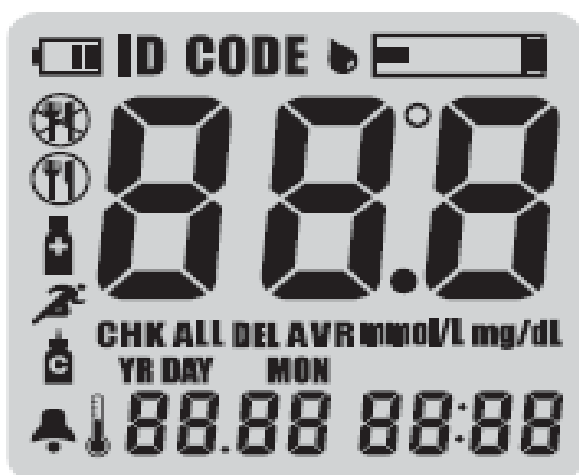

Advarsel lavt  
batteri

CODE

Strip kode



Blod prøve test.  
Meter klar til test



Alarm



Før et måltid



Efter et måltid



Efter sports  
aktivitet



Efter indtagelse  
af medicin



Væske kontrol  
test



Temperatur/dato

mmol/L mg/dL

Test resultat  
enhed




Klokkeslet

DEL

Slet data

## Test strip

Myglucohealth test strips må kun anvendes sammen med Myglucohealth måler.

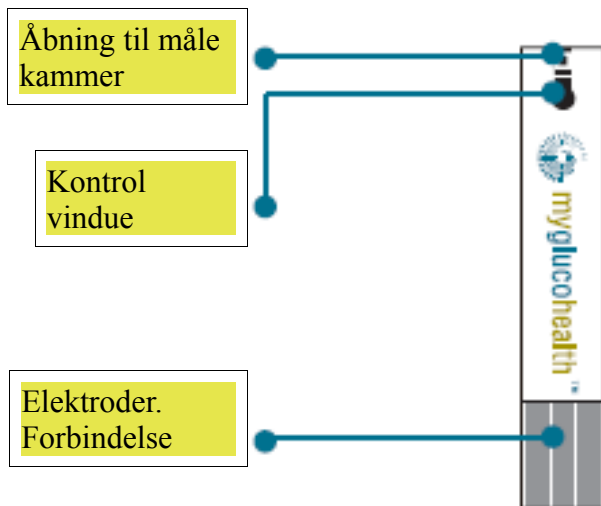

## Opbevaring og håndtering af test strips.

1. Opbevar ikke test strips i direkte sollys.
2. Opbevar test strips beholderen et køligt og tørt sted mellem 2-30 gr. Ikke i køleskab eller fryser.
3. Gør et notat af dato på hættten af beholderen første gang du åbner den. Udløbsdato er 3 måneder efter du første gang åbner en beholder.
4. Luk hættten på beholderen korrekt strakt efter du har taget en strip fra beholderen.
5. Anvend ikke test strips efter udløbsdato som er noteret på beholderen. Dette kan medføre ukorrekte målinger.
6. Undgå at der kommer snavs , madvarer eller vand på test strips. Bøj , klip eller ændre ikke Myglucohealth strips.
7. Myglucohealth strips er kun til engangs brug.
8. Hold test strips beholderen væk fra børn.
9. Der henvises til test strips instruktioner for Myglucohealth for yderligere information.

## Efterkontrol af systemet

Kontrol væske test er sammenlignelig med en rigtig blod prøve test. Blot anvendes væske i stedet for blod. Væsken kan også anvendes til at øve dig på udstyret.

Myglucohealth kontrol væske er beregnet til at kontrollere at måler og test strips arbejder sammen som et system og at du udfører dine test korrekt. Det er vigtigt at kontrol væsken anvendes kontinuerligt for at sikre at du modtager korrekte resultater.

Myglucohealth kontrol væske indeholder et målt mængde af glucose som reagerer sammen med Myglucohealth kontrol væske test strips. Sammenlign din kontrol væske tests med den forventede registrering som er printet på beholderen.

## Hvornår skal der foretages en kontrol væske test.

- Når en ny beholder af test strips åbnes.
- Når du har en formodning om at Myglucohealth måler eller test strips ikke fungerer korrekt.
- Når din blod glucose test resultater ikke konsekvent med dine symptomer eller hvis du mener de ikke er korrekte.
- Hvis du har tabt Myglucohealth måler.
- Rutinemæssig brug for at opnå korrekte resultater.

## Vigtig information om kontrol væske test.

- Brug kun Myglucohealth kontrol væske.
- Kontrollér udløbsdato på beholderen. **Anvend ikke test strips hvis datoen er udløbet.**
- Myglucohealth kontrol væske skal opbevares ved temperatur under 30 gr.
- Det anbefales at test strips altid opbevares ved stuetemperatur 21-25 gr.
- Ryst kontrol væsken og tag hættten af. Sørg for at hættten slutter tæt efter brug.
- Må kun anvendes op til 3 måneder efter første åbning. Notér dato første gang beholderen åbnes.
- Bortskaf test strips hvis der er mere end 3 måneder siden første åbning.

## Sådan foretages Myglucohealth kontrol væske test



Trin 1. Isæt test strip.

Isæt en test strip i toppen af Myglucohealth måler.  
Myglucohealth måler vil bippe og automatisk tænde for udstyret og vise kode nummer på skærmen.



Trin 2

Vælg aktivitet ved at trykke op eller ned på pil taster.

Vælg "using control solution" Når "using control solution" er valgt tryk på tænd/sluk tasten.

"Strip-Shape" symbol vil vises på skærmen en gang.



Trin 3.

Ryst kontrol væsken godt. Tag hættten af. Kassér den første dråbe fra kontrol væsken. Hvis større bobler fremkommer på tuden af hættten tør boblerne væk med en ren klud før anvendelse af kontrol væsken. Påfør en hel dråbe af kontrol væsken ved at klemme forsigtigt på beholderen for at danne en dråbe. Tag Myglucohealth meter med test strip isæt og rør toppen på test strip til den dråbe der hænger på beholderen. Vær sikker på at holde test strip til dråben indtil du hører et bip fra Myglucohealth måler.



Trin 4.


Så snart du hører et "bip" indikerer dette at test strip er fyldt og måleren vil begynde nedtælling fra 3 sekunder til 1 sekund og test resultat vil vises på skærmen. Sammenlign resultatet med de værdier der er oplyst på beholderen. Resultatet skal ligge indenfor denne værdi.

Hvis resultatet ligger udenfor disse værdier gentages testen foran som beskrevet.

## Indstilling af måler.

Myglucohealth indeholder et udvalg af innovative funktioner:

Bippe lyde til meddelelser når indstillings funktioner er udført. Inderholder dato, tid, test enheder og evnen til at designe 3 data gennemsnit.

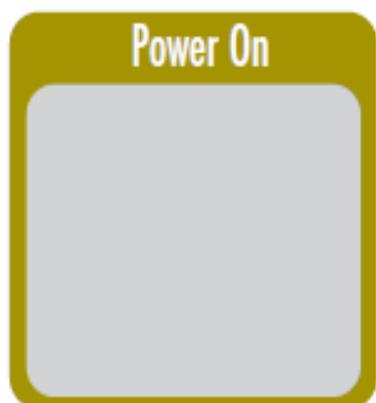


Tryk og hold tænd/sluk tasten i ca. 3 sekunder.



Årstal :Tryk og slip enten op eller ned pil tasten for at indstille årstal. Herefter tryk på tænd/sluk tast



Dato/tid: Tryk og slip enten op eller ned pil tasten for at indstille dato og tid. Herefter tryk tænd/sluk tast.

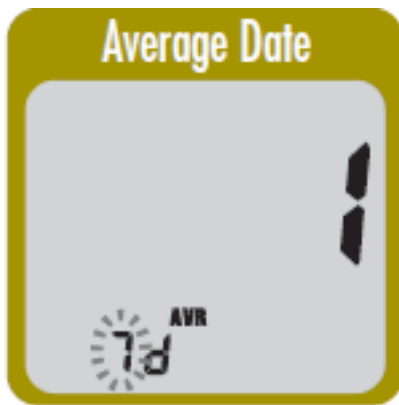

Gennemsnit dato :Tryk og slip enten op eller ned pil tast for at indstille gennemsnit af test dage.  
Herefter tryk på tænd/sluk tast.



Alarm:Tryk og slip op eller ned pil tast for at indstille alarmeren.  
Herefter tryk på tænd og sluk tast.



Alarm tid: Tryk og slip op eller ned pil tast for at indstille alarm tid.  
Herefter tryk på tænd og sluk tast.



Bemærk du kan indstille op til 5 gennemsnitlige datoer.

Alarm: Indstil de ønskede antal alarmer

Tryk på tænd/sluk tast.

alarmer og 3

1. Uden at indstille datoer korrekt vil gennemsnittet på glucose niveau og resultaterne i hukommelsen ikke vise de korrekte værdier. Du skal indstille måleren ved første gangs brug og ved udskiftning af batterier.
2. Du kan ikke teste dit glucose værdi når udstyret befinder sig i indstillings mode.
3. Årstal fra 2007-2099

### Automatisk kode gengivelse.




1. Myglucohealth har en automatisk kode gengivelse.

2. Kode nummer genkendes automatisk og indstiller måleren i overensstemmelse hertil. Denne innovative og bekvemme funktion forhindrer indtastningsfejl og forenkler test.



### Indsamling af blod dråbe.

## Step 1

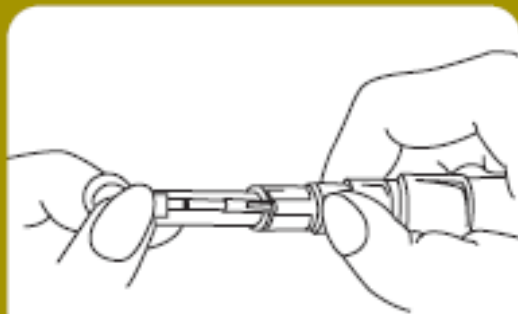

Trin 1. Skru transparent spidsen af lancet udstyret og sæt en lancet fast på holderen.

## Step 2



Trin 2. Bræk kappen af lancet og nåle spidsen kan ses.


## Step 3



Trin 3. Nålespidsen kan indstilles til 5 forskellige niveauer til gennemtrængning af huden. Til gennemtrængning i den bedste dybde brug : 1-2 til tynd og blød hud. 3 til gennemsnitlig hud, 4-5 til tyk eller hård hud.

Trin 4. Hold spidsen i den ene hånd og træk skyde stykket med den anden. Når du føler et klik indikerer dette at lancet udstyret er i låst position og klar til brug.

## Step 4

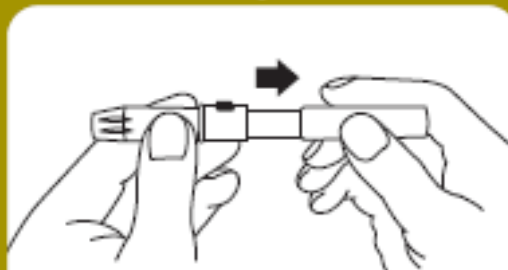

## Step 5




Trin 5. Frigør ærmet. Det vil automatisk forbinde og flytte tilbage til det original position tæt på udløsnings stedet.

Trin 6. Placer lancet udstyr mod fingerspidsen. Tryk på udløser knappen. Din blod prøve skulle nu være klar til at blive tilført på test strip.

Tag lancetten ud og bortskaf den.

## Step 6

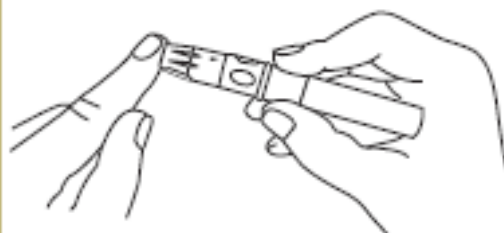

## Test dit blod glucose.

Før du begynder test af dit blod glucose læs nøje denne sektion. Vær opmærksom på du har alle 4 dele inden du begynder din test.



1. Myglucohealth måler
2. Myglucohealth test strip
3. Finger prikker
4. Sterile lancetter

For at begrænse risiko for en infektion eller smitte må dit udstyr ikke deles med andre personer. Udstyret må kun anvendes til personlig brug.

1. Anvend altid en ny steril lancet. Disse er til engangsbrug.
2. Undgå at få håndlotion, olie, snavs eller andre ting på lancetter og fingerprikker.

## Test dit blod glucose fortsat

Gør dig fortrolig med praktisk brug af fingerprikker gennem følgende. Vask dine hænder med varmt vand og sæbe. Tør dine hænder grundigt.



## Trin 1.





Isæt Myglucohealth test strip i åbningen til test strip på måleren med ” MYGLUCOHEALTH” logo opad. Når du har isæt test strip tænder måleren automatisk og kode og temperatur vises automatisk. Efter 3 sekunder vil kode nummer og test temperatur forsvinde.

Bemærk hvis du vender test strip forkert vil måleren tænde, men testen kan ikke gennemføres.

1. Hvis du ikke får bekræftet kode nummer indenfor 3 sekunder tag test strip ud igen og isæt på ny.
2. Hvis ikke kode nummer som vises på skærmen passer til kode nummer på beholderen prøv en ny test strip.
3. Hvis ikke måleren tænder når du har isat en test strip tag test strip ud og isæt på ny.
4. Undgå test i direkte sollys.
5. Hvis du tilfører din blodprøve for tidligt vil ” error” vises på skærmen.

## Trin 2.

Vælg en af følgende funktioner.

-  Før indtagelse af et måltid
-  Efter indtagelse af et måltid.
-  Efter sports aktivitet
-  Efter indtagelse af medicin.

På skærmen vises et symbol af test strip som blinker. Dette indikerer måleren er klar og du kan tilføje din blod prøve til åbningen på test strip i toppen.



Korrekt fyldt test strip. Kanalen er fyldt.




Forkert fyldt test strip. Kanalen er ikke fyldt.

### Trin 3.

Placér din fingerspids til toppen af test strip. Blodet vil nu automatisk flyde ned i kanalen på test strip. Fortsat indtil du hører et ”bip”. Mindste blod prøve indhold er 0,3 ul.

Bemærk hvis du ikke udfører din test indenfor 3 minutter slukker måleren automatisk.

#### Trin 4.

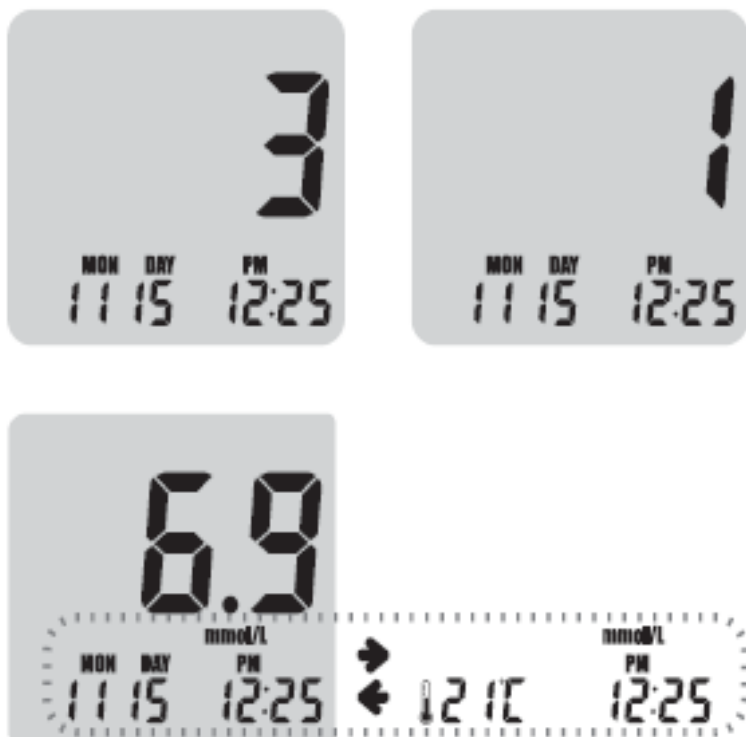

Når du hører et ”bip” vil testen automatisk begynde og dit resultat vil vises indenfor 3 sekunder. Nedtælling sker fra 3 sekunder til 1 sekund. Nu vises resultatet af dit blod glucose værdi, temperatur og tid .

Notér dit resultat ind via Myglucohealth portal. Når du udtager test strip slukker måleren automatisk.

Udløs af test strip.



1. Efter test skub udløser knap fremad og udtag test strip fra måleren.
2. Bortskaf den brugte strip og lancet.



## Overblik over dine test resultater.

Myglucohealth måler gemmer op til 365 tests i den indbyggede hukommelse og optager dit gennemsnitlige værdier af det antal dage som du har ønsket som skal beregnes og gemmes. Disse værdier kan genses på skærmen.

Tryk på tænd/sluk tasten. Nu vises de seneste af dine test. Du kan checke dine individuelle data fra de sidste 3 dage og forrige gennemsnitlige indstilling ved at trykke på enten op eller ned pil taster. Se nedenfor.

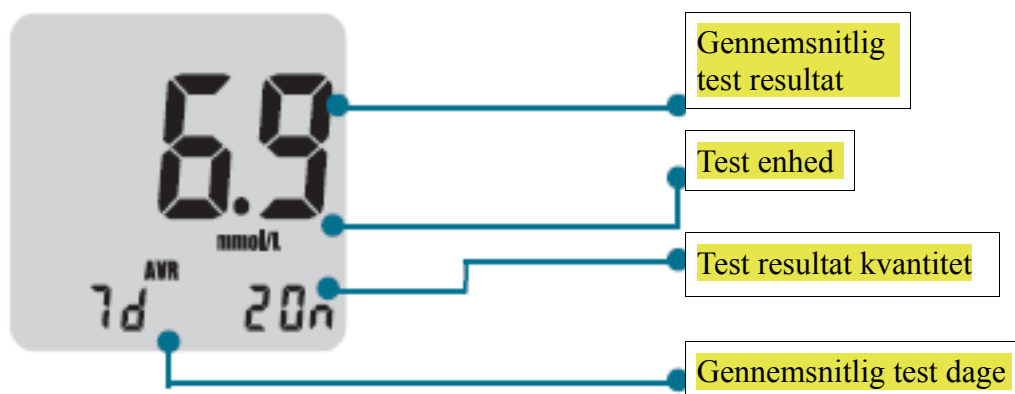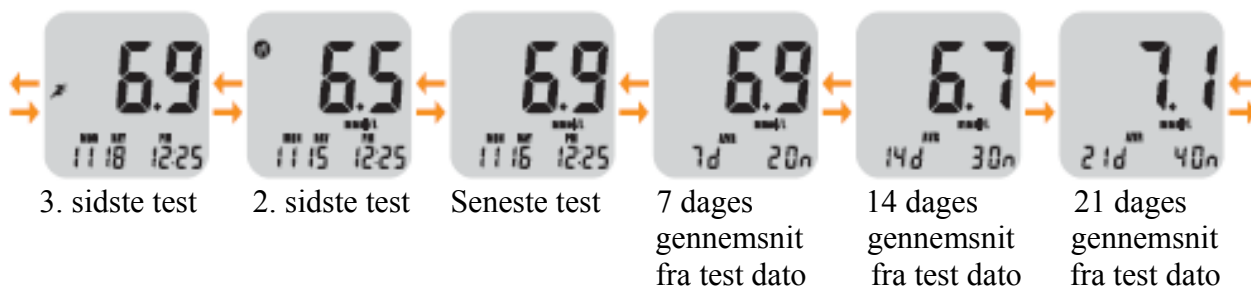

Tryk pil tast op: Her viser forrige resultat.

Tryk pil tast ned: Her vises test resultat gennemsnit af de sidste 7 dage, 14 dage, og 21 dage.

## Sletning af test resultater.

Myglucohealth indeholder en funktion til sletning af dine test resultater.



Sletning af individuelle test resultater.

For at slette et individuelt test resultat tryk på op eller ned tasten i 3 sekunder.

Sletning af alle test resultater.

For at slette alle test resultater tryk på op og ned pil tasterne samtidig i 3 sekunder.

Bemærk:

1. Kun individuel valgte test resultater er slettet når du genkalder dine test resultater.
2. Slettede test resultater kan ikke genskabes. Vær sikker på hvilke data du ønsker at slette før brugen af slette funktionen.
3. Det er højt anbefalet ikke at bruge denne funktion og kun efter uploading af data på din portal.

## Bluetooth funktion.

### Omhandler kun MGH-BT 1

Til denne brug skal du have en mobil telefon med Bluetooth og som har SPP funktion.  
( SPP- Serial Port Profile, a-Initiator , b-Acceptor)

Myglucohealth JAVA applikation skal installeres på din mobil telefon. Hvis dette ikke allerede er installeret venligst gå til specificeret side og følg instruktionerne for downloading og installering.

[www.myglucohealth.net/mobile/mgh.jad](http://www.myglucohealth.net/mobile/mgh.jad)



Du kan overføre dine test resultater fra Myglucohealth måler til din Bluetooth mobil telefon.  
Først verificer forbindelsen mellem din Myglucohealth måler og din mobil telefon. ( Pairing)

Venligst følg pairing processen fra trin 1 – 4. Efter du har udført denne pairing proces kan du bruge kommunikationen.



### Trin 1. Pairing.

Tryk på pil tast op (Pair) På skærmen vil vises tiden med ét sekund interval.  
Når Myglucohealth måler forbinder med din mobiltelefon vises samtidigt et ” P”

### Bluetooth funktion. Kun KGH- BT!

## Trin 2.

Indtast PIN nummer.

Indtast pairing nummer ( 0000) på din mobiltelefon for at begynde pairing processen med Myglucohealth måler.


## Trin 3.

Pairing ( forbundet )

Når din Myglucohealth måler har skabt forbindelse med din mobil telefon vil på skærmen fremgå et ” P” som bekræfter forbindelsen

## Trin 4. Dvale tilstand

Når du trykker på tænd/sluk tasten vil din måler gå i dvale og skærmen vil slukke.

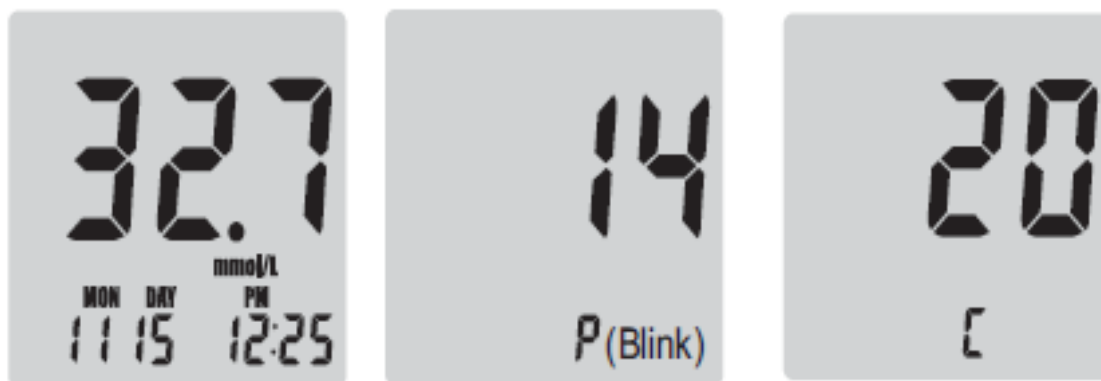

## Trin 5.

Forbered din test som sædvanligt.

## Trin 6.

Tryk på tænd/sluk tasten. Skærmen skal være blank.

### Trin 7.

Tryk på pil tast ned ( send ) Skærmen vil vise en tælling med ét sekund interval.

### Trin 8. Send test data.

Indenfor få sekunder vil skærmen vise ”P”. hvilket indikerer Myglucohealth måler er forbundet til mobil telefon eller PC. med Bluetooth mulighed. Efter få sekunder transmitteres de lagrede dataer til det valgte Bluetooth udstyr.

### Trin 9. Færdig ( Dvale tilstand )

Tryk på tænd/sluk tasten og din Myglucohealth måler går i dvale og skærmen vil slukke.

Hvordan læses test resultater som er sendt via Bluetooth til enten mobiltelefon eller Pc.

### Trin 1. Pairing.

Tryk på op pil tasten (pair) Skærmen vil vise en tidstælling med 1 sekund interval. Indenfor få sekunder vil skærmen vise et ”P” når din Myglucohealth måler er forbundet til mobil telefon eller PC.

### Trin 2.

Start din Myglucohealth applikation på din mobil telefon og naviger til ” home” and vælg ” Sync Meter ” eller hvis du vælger at bruge en Bluetooth pc i stedet gå til [www.myglucohealth.net](http://www.myglucohealth.net) on line og tryk på ” get readings ”

Du må downloade mobil JAVA applikation for at bruge til mobil telefon.  
[www.myglucohealth.net/mobile/mgh/net](http://www.myglucohealth.net/mobile/mgh/net) for at pair til Myglucohealth måler med mobil telefon eller bruger Bluetooth PC. for at pair din mobil telefon til PC. før transmission til enten mobil telefon eller PC.

### Trin 3.

Når test resultater bliver vist på din mobil telefon vælg enten ” send eller store ”. Hvis du vælger store ( gemme ) vil data ikke sendes før ” send ” er valgt eller når du er forbundet med PC. ( enten via Bluetooth eller USB kabel) og ”start ” når ” continue ” er begge valgt.

Du kan herefter gå til Data Tab på [www.myglucohealth.net](http://www.myglucohealth.net) for at verificere at test resultater er sendt.

## Registrering på Myglucohealth. net

Efter modtagelse af din Myglucohealth måler kan du registrere dig på [www.myglucohealth.net](http://www.myglucohealth.net) og indtaste det serie nummer på bagsiden af din måler eller alternativt på pakken.

Ved registrering bliver din håndtering af diabetes mindre kompliceret og du vil her få gavn af de medfølgende værktøjer som har stor betydning for håndteringen af diabetes.

Myglucohealth. net er en engelsk sproget version men er meget let og enkel at betjene. Der kan vises diagram over dine tests og mange flere muligheder. God fornøjelse.

## Pleje og opbevaring af din Myglucohealth måler.

For sikker akkurat og lang holdbarhed af din måler skal den behandles omsorgsfuldt.

1. Myglucohealth måler aftørres med en ren og blød klud. Hvis nødvendigt kan en mild aftørring med mildt rengøringsmiddel anbefales. Brug ikke kemiske midler eller acetone da disse kan skade din måler.
2. Hvis du aftørres din måler med vand og mildt rengøringsmiddel skal dette påføres en ren klud og ikke direkte på Myglucohealth måler. Opbevar herefter din måler et tørt sted og aldrig i direkte sollys.

Opbevar ikke din Myglucohealth måler og test strips i vand eller væsker. Elektromagnetiske felter som f.eks. mikroovn kan beskadige din måler. Opbevar derfor din måler i afstand fra dette.

3. Efter test opbevar din måler i den dertil indrettet bæretaske. Sørg for den opbevares udenfor børns rækkevidde.
4. Luk beholderen til dine test strips straks du har taget en test strip.
5. Din fingerprikker aftørres med vand og mildt rengøringsmiddel.
6. Bortskaf dine brugte test materialer i henhold til de regulativer der er gældende i dit lokal område.
7. Myglucohealth måler kan bortskaffes som genbrugs effekt på din lokale genbrugs station.

## Batteri installation.

Ved lav batteri funktion vil et symbol vises i venstre hjørne på skærmen for at alarmere dig ved lav rest batteri. Når dette symbol vises skal du udskifte til nye batterier.

Myglucohealth måler vil ikke tænde når batterier er udtømt.



Din Myglucohealth måler bruger 2 stk. 1,5V alkaline batterier (AAA) 1 sæt batterier er inkluderet i et start sæt. Brug kun 1,5 V AAA batterier.

Før udskiftning af batterier skal du sikre dig din måler er slukket. Placér nye batterier som vist når du åbner låget. Skift altid begge batterier samtidigt.

## Problem løsning.

Følgende skema kan hjælpe dig til at identificere problemer men kan ikke løse alle problemer der kan opstå. Kontakt din leverandør hvis et problem fortsætter.

Besked

Problem

Gør dette



Problem med måler

Tag batterier ud og isæt igen. Hvis dette ikke løser problemet kontakt venligst din leverandør.



Der anvendes forurenede test og/eller brugt test strip

Test med en ny test strip



Problem med test strip

Foretag ny test med ny test strip. Hvis samme besked gentager sig kontakt din leverandør.



Problem med test strip

Ny test med ny strip

Problem løsning fortsat.

## Besked



## Problem

Blod prøven blev tilført inden symbol for test strip blev vist på skærmen

## Løsning

Gentag testen med ny test strip. Tilfør først blodet når symbol vises på skærmen.



Den omgivende temperatur er for lav

Placér måleren indenfor den temperatur som er anbefalet og gentag testen.



Test resultatet er lavere end 0,6 mmol/L

Hvis "Lo" besked fortsætter venligst kontakt din læge



Den omgivende temperatur er for høj

Placér måleren i anbefalet temperatur og foretag en ny test.



Test resultat er højere end 33,3 mmol/L

Hvis "HI" besked fortsætter venligst kontakt din læge.

## Problem løsning fortsat.






Besked	Problem	Løsning
The meter does not power on ( Måleren tænder ikke )	Batterier er flade eller døde	Udskift batterier. Hvis problem fortsætter kontakt din leverandør
Test does not start after applying blood sample (Test starter ikke efter tilførelse af blod på test strip)	Ikke nok blod	Gentag test og tilføj tilstrækkelig mængde blod som anbefalet.









The result is doubtful ( Testen er tvivlsom )	Der må være et problem med test strip eller kodning funktion	Gentag test med ny test strip. Eftersø om kode er ens på måleren og indhold på beholder til test strips.
---	--	--

### **Teknisk Data:**

Prøve type	Fuldblod, kapilært
Prøve dråbe	0,3 ul
Test område	0,6 – 33,3 mmol/L
Testtid	3 sekunder
Kalibrering	Plasma kalibreret resultat
Højder	3048 meter over havets overflade
Drifttemperatur	10° 40° C
Driftfugtighed	10 – 90 %
Strips opbevarings temperatur	2° – 30° C
Skærm type	LCD
Dimensioner	52,2 x 98,5 x 23,4 mm
Vægt	74,5 g
Strømkilde	3 V Alkaline batterier 1,5 V AAA
Batteri levetid	2000 tests
PC kommunikations port	Forbind til computer med medfølgende USB kabel-
	Forbind til mobil telefon eller computer via Bluettoth
Kodning	Automatisk kode anerkendelse

## Syboler.

Symbol	Forklaring
	Se instruktioner
	Udløbs dato
	Dette produkt opfylder Directive 98/79/EC in vitro diagnostic medical devices
	Advarsel. Se tilhørende dokumenter
	In-Vitro-Diagnostic Device

	Batch nummer
	Reference nummer
	Opbevarings temperatur
	Må ikke bruges
	Skal anvendes inden 3 måneder
	Må ikke genbruges
	Produktions dato
	Hold væk fra direkte sollys

Laboratorium system som er anvendt til kalibrering af Myglucohealth system er YSI 2300 STAT.

## Blod glucose konverterings tabel.

mmol/L	0.55	1.0	1.5	2.0	2.2	2.5	2.8	3.0	
mg/dL	10	18	27	36	40	45	50	54	
mmol/L	3.3	3.9	4.0	4.4	4.7	5.0	5.5	6.0	6.1
mg/dL	60	70	72	80	85	90	100	108	110
mmol/L	6.7	7.0	7.2	7.5	7.8	8.0	8.3	8.9	
mg/dL	120	126	130	135	140	145	150	160	
mmol/L	9.0	9.4	10.0	10.5	11.0	11.1	12.0	12.5	13.9
mg/dL	162	170	180	190	196	200	216	225	250
mmol/L	14.4	15.0	16.0	16.6	17.0	18.0	19.0	20.0	
mg/dL	260	270	288	300	306	325	342	360	
mmol/L	20.8	22.2	23.0	24.0	25.0	26.4	27.7	30.0	33.3
mg/dL	375	400	414	432	450	475	500	540	600

## Garanti.

Vi takker for dit valg af Myglucohealth måler udstyr og vi håber du vil blive tilfreds med anvendelsen af udstyret og de muligheder og fordele udstyret giver dig for kontrol af dit blodsukker.

Garanti perioden på produktet er 2 år fra købsdatoen og ydes kun overfor den oprindelig køber og kan ikke overdrages.



CuraTec Aps  
Scandinavian Trade Building  
Gydevang 39 – 41  
DK – 3450 Allerød

[curatec@mail.dk](mailto:curatec@mail.dk)  
[www.curatec.dk](http://www.curatec.dk)

CVR: 31934389



myglucohealth